


SteriCLIN[®] Blue Line – kuitukangaspakkaukset

Erikoispakkaukset tilaville ja/tai painaville kokonaisuuksille

Stericlin[®] Blue Line kuitukangaspakkaukset ovat pakkausratkaisu painaville ja tilaville, sterilointia vaativille välineille, kuten astioille. Blue Line-kuitukangaspussit ovat myös usein ratkaisu steriloinnissa esiintyviin kosteusongelmiin. Blue Line-pakkaukset on valmistettu kestävästä 60 g/m²: kuitukankaasta ja sen kanssa yhteen peel-saumalla saumatusta kerroslaminaatista. Pakkaukseen on painettu kolme lyijytöntä indikaattoria eri sterilointimenetelmiä varten varsinaisen pakkausalueen ulkopuolelle. Blue Line:ssa yhdistyvät tavanomaisen laminaatti/paperipakkauksen ja kuitukankaan edut. Lisääntyneen pehmeyden ja joustavuuden vuoksi pakkausten käsittely on miellyttävämpää ja ne ovat nopeammin täytettäviä.

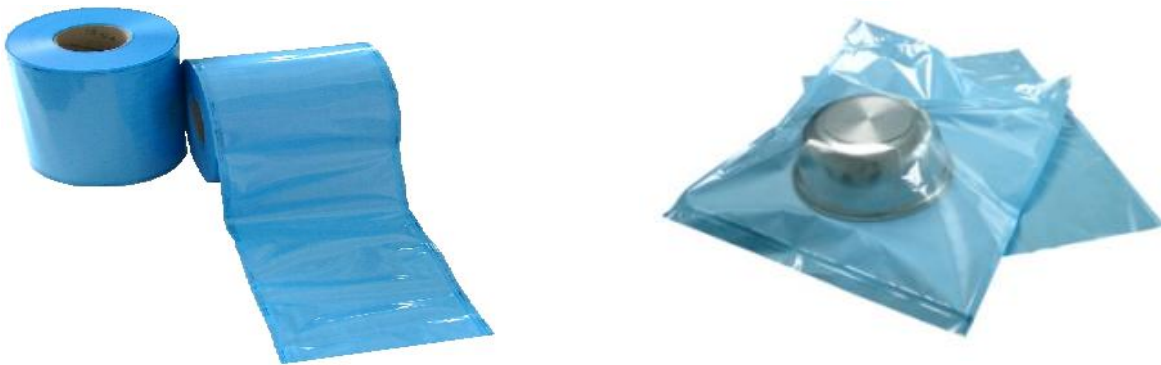

Käyttöohje:

Stericlin[®] Blue Line kuitukangaspakkaukset ovat suunniteltu kestäämään suurempia rasituksia kuin tavanomaiset pussit. On kuitenkin syytä huomioida tietyt asiat pakkauksen käytössä.

Täyttö:

Stericlin[®] Blue Line kuitukangaspakkauksia ei tule täyttää enempää kuin $\frac{3}{4}$ niiden tilavuudesta. Terävät nurkat ja pistävät instrumentit on suojattava. Pakkauksen sisällön ja sauman sisäreunan välille tulee jättää vähintään 5 cm:n tyhjä alue. Vältä taitoksia, ne heikentävät materiaalia. Avoimet astiat ja maljat tulee pakata siten, että astian suu on kuitukangasosaa vasten ja pohja laminaattia vasten. Siten mahdollistetaan höyryn maksimaalinen tunkeutuminen ja tehokas kuivuminen.

Saumaaminen:

Tavanomaisten pakkausten saumaamiseen käytetyt saumauslaitteet soveltuvat käytettäväksi. Saumauslämpötila riippuu laitteesta ja sen kunnosta, normaalisti n. 180° - 190°C on riittävä.

sterilointikoriin:

Pienemmät pakkaukset tulee asettaa sterilointikoriin kyljelleen siten, että ne tukevat toisiaan. Pakkaukset asetetaan siten, että laminaattiosa tulee laminaattia vasten ja kuitukangasosa kuitukangasta vasten. Suuret pakkaukset asetetaan lappeelleen siten, että kuitukangasosa tulee alapuolelle. Näin menetellen maksimoidaan höyryn tunkeutuminen ja kuivausvaiheen tehokkuus. Ota huomioon sterilointilaitevalmistajan suositukset.

Steriloinnin jälkeen:

Tarkista indikaattorin värin vaihtuminen sekä se, että pakkauksessa ei ole vaurioita. Jos pakkauksessa esiintyy kosteutta vielä 30 minuuttia steriloinnin jälkeen, välineet eivät ole varastointikelpoisia ja ne on pakattava uudelleen.

Pakkausten avaaminen:

Pakkaukset ovat ns. peel-pakkauksia. Ne avataan vetämällä materiaalit irti toisistaan: Pusseiksi valmistetuissa pakkauksissa on erityisesti avaamista varten suunniteltu avausnurkka. Painavia ja särkyviä välineitä sisältävät pakkaukset on avattava pöytätason päällä.

Varastointi:

Säilytä pakkaukset hygieenisissä ja neutraaleissa olosuhteissa.

Stericlin® Blue Line – tuotevalikoima

Pussit

Tilausno.	Tuotekoodi	Koko cm	Pakkaus (pussia/ltk)
VP1975	4FKFB000591	27 x 36	500
VP1977	4FKFB000593	32 x 45	500
VP1979	4FKFB000595	40 x 52	500
VP1980	4FKFB000601	50 x 60	250
VP1981	4FKFB000602	57 x 72	250

Rullat (pituus 100 m)

Tilausno.	Tuotekoodi	Lev (cm)	Pakkaus (rullaa/ltk)
VP2531	4FKFS000520	20	2
VP2535	4FKFS000526	42	1

www.vp-group.de