


# Clinichem

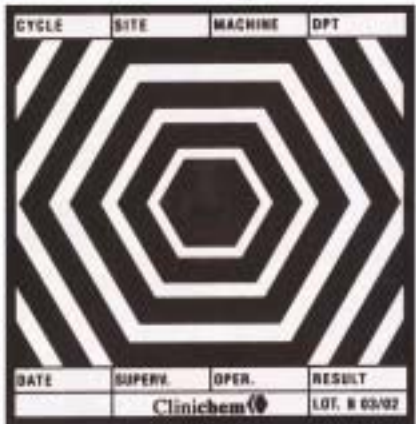

Alkuperäinen



**Hyväksytty testi**  
- Tasainen musta/tumman ruskea.



**Ilmatasku (vaalea läiskä keskellä tai keskustan tuntumassa)**  
- Oven tiiviste tai anturin tai tuuletin läpivienti tai putkiliitokset vuotaa.  
- Alipaineistus ei toimi.  
- Laite huollettava.



**Ylisterilointi (tasainen ruskea)**  
- Lämpötila liian korkea suhteessa paineeseen tai testi-aika liian pitkä tai molemmat.



**Märkä höyry tai tiivistymättömiä kaasuja (läiskää/kuvioita/rengasmainen kuvio keskellä)**  
- Paine tai lämpötila tai molemmat liian alhaiset.  
- Kuivaus toimii puutteellisesti.  
- Höyryn seassa hiilidioksidia.