



CLINICHEM TESTIPAKKAUS VAKUUMIAUTOKLAAVEILLE

Ainoa suomalainen testipakkaus höyryautoklaavin päivittäiseen testaamiseen

Standardi ISO 17665 edellyttää sterilointilaitteiden säännöllistä validointia ja päivittäistä toiminnan rutiinitarkastusta. Autoklaaveille päivittäistarkastus tehdään testikuorman ja testiarkin yhdistelmän sisältävällä testipakkauksella. **Clinichem** vakuumiautoklaavin testipakkaus on SFS EN ISO 11140-4:n mukainen. Se on kotimainen.

Clinichem testipakkauksessa käytetty reaktiivinen väri on lyijytön, liuotinaineeton ja käytössä myrkytön. Reaktio on pysyvä jolloin testitulosta voidaan myöhemminkin tarkastella sellaisena kuin se välittömästi testin jälkeen on ollut. Reaktiivinen väri on painettu EN 868-3:n mukaiselle medical -paperille, jonka läpäisevyys vastaa sterilointipakkauksessa käytetyn paperin läpäisevyyttä. Vastaava läpäisevyysvaatimus on asetettu Bowie&Dick-testin testiarkille.

Clinichem testipakkauksesta voidaan tulkita autoklaavin tavallisimmat toimintavirheet:

- Ilmajäämät tai puutteellinen alipaineistus
- Muiden tiivistymättömien kaasujen läsnäolo
- Höyryn laatu
- Höyryn läpäisyongelmat

Clinichem Oy Ltd.

Hallitie 12
47400 Kausala
p: 05 381 8180
fax: 05 3818183

e-mail:
clinichem@clinichem.fi

www.clinichem.fi

TUOTETIEDOT

Tuote:

SFS EN ISO 11140-4:n mukainen vakuumiautoklaavin päivittäistestipakkaus.

Mitat:

- pituus 120 mm
- leveys 120 mm
- korkeus 28 mm

Paino/kpl:

- 190 g +/- 4 g

Pakkaus:

- Materiaalit: Valkaisematon kartonkilaatikko, polyeteenipussi ja polypropeeniteippi
- Määrä: 20 kpl/laatikko
- Paino: Noin 4,0 kg brutto

Käyttö:

Vakuumihöyryautoklaavien kunnan testaukseen. Älä käytä muuhun tarkoitukseen. Kertakäyttöinen.

Aseta pakkaus kammion alaosaan lähelle ovea ja aja testiohjelma. Testin jälkeen poista pakkaus kammioista. (Varoitus: Pakkaus saattaa olla kuuma heti testin jälkeen!!). Kun pakkaus on riittävästi jäähtynyt, pura pakkaus ja suorita testituloksen arviointi.

Testituloksen tulkinta:

Tulkinta tehdään testiarkki valkoiselle taustalle asetettuna erillisen ohjeen mukaan. Visuaalisessa tulkinnassa testiarkin tulee painetuilta alueiltaan olla tasaisen musta tai tumman ruskea. 121 °C:n ohjelmassa tai B -luokan pöytäautoklaaveissa lopputulos saattaa olla hieman harmahtava. Sävyvaihtelu arkin painetulla alueella on merkki autoklaavin puutteellisesta toiminnasta tai huoltoa ja korjausta vaativasta viasta.

Säilytys:

Kuivassa, viileässä, valolta suojattuna. Suositellaan säilytettäväksi alkuperäisessä, suljetussa kuljetuspakkauksessaan ennen käyttöönottoa.

Säilyvyys:

Suosituksen mukaan varastoituna säilyy vähintään kolme vuotta valmistuksesta. Parasta ennen -päivä merkitty etikettiin.