



Kammio on ruostumatonta terästä. Se on yksittäinen lohko, ilman hitsattuja saumoja jotka voivat aiheuttaa ruustumista, vuotoja tai halkeamia joihin mikro-organismit voivat kerääntyä.

Tarjottimen pidikettä voi pyörittää, ja se voi kannatella 5:ttä tarjotinta tai instrumenttिलाatikkoa.

Saatavissa 17 ja 22 litran kapasiteetilla

LCD näyttö ilmaisee syklin status viestit, laitteen asetukset ja käyttöoppaan. Viestit ovat saatavissa useilla eri kielillä.

Paneelissa sijaitsevat napit kuvaavat laitteen perustoimintoja ja ohjaavat käyttäjän eri valikkovaihtoehtojen läpi.

Edestä lautautuva ja tyhjenevä vesijärjestelmä.

USB yhteys joka mahdollistaa käyttäjälle sterilisointisyklin tietojen purkamisen ja tallentamisen .txt tiedostoon seurantatarkoitusta varten.

Edessä sijaitseva ON/OFF kytkin.

Valinnaisia

Sole käyttää DROPIa (Direct Reverse Osmosis Purifier), kaikkein innovatiivisintä, ekoystävällistä ja taloudellista järjestelmää tuottaakseen demineralisoitua vettä. DROP operoi tuloaukon vedenpaineella ja on varusteltu suodatinsetin kera tuottaakseen noin 500 litraa demineralisoitua vettä.

DROP tuottaa vettä sopivalla johtokyvyllä joka sopii tsekä suojaamaan höyrykehittintä ja letkuja että takaamaan kuivan, tyydyttyneen korkeapuhtauksisen höyryn.


Tämä järjestelmä eliminoi tislattun veden oston ja varastoinnin tarpeen tai minkä tahansa muun laitteen tarpeen veden demineralisointiin.

DROPIa käyttämällä, sterilisaatiosyklin hinta on lähes nolla verrattuna kaikkiin muihin järjestelmiin. Kaikki sterilisointisyklit käyttävät 0,5 l vettä ja jokainen suodatin takaa puhtaan veden tuhanteen (1000) sykliin niiden käyttöeliniän aikana.



 **trident srl**
Via Verdi No. 20,
20090 Assago, MI, Italy
Tel: +39 0287072380
Fax: +39 0287072381
www.trident-dental.com
info@trident-dental.com

Document: BS17&22
Version: 01-Jan 2016

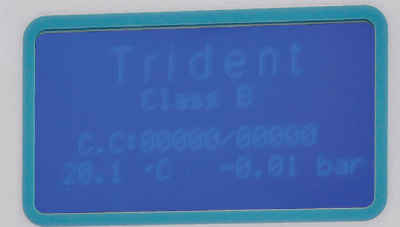

trident



Koska sterilointi ei ole vaihtoehto, Trident esittää uuden Solen, luokan B autoklaavin erikoisominaisuuksilla taataksaan syvemmän steriloinnin.

Sole

Luokan B 17 & 22 litran Autoklaavi

Sole täyttää korkeimmat bioturvallisuus standardit taatakseen kaikkien instrumenttien ja käytettyjen materiaalien täydellisen steriloinnin Teidän jokapäiväisessä käytössänne.

Riippuen steriloitavan kuorman luonteesta, SOLE tarjoaa 12 erilaista sterilointisykliä joista valita, mukaanlukien luokan B syklit ja kaksi ohjelmoitavaa, halutun kaltaiseksi räätälöitävää sykliä.

Solella on 3 sykliä testaukseen ja validointiin, vakuumitestit, Helix testi ja B&D testi.

Nopea sykli steriloi kiinteät instrumentit ja materiaalit vain 28 minuutissa.

Solella seuraavia on helppo tarkastella:

- Veden laatu sähkönjohtavuus mittarilla, joka on asennettu täyttötankkiin
- Milloin sinun tulisi säätää oletus painearvoja maksimitehon saavutettavaksi alueilla, jotka sijaitsevat korkealla
- Milloin sinun tulisi vaihtaa osia, jotka voivat aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita autoklaaville. Laite neuvoo sinua varoitusviestillä.
- Milloin sinun tulisi puhdistaa vesitankki.

Sole erottuu joukosta:

Klassisella ja elegantilla muotoilulla

Helpolla käytöllä

Käytännöllisellä, automaattisella ovijärjestelmällä

Mukautuvalla ohjelmistolla®

Korkeatasoisella suoritustasolla kaikilla sterilointisykleillä

Sole

Kun muotoilu kohtaa käytännöllisyyden



Kuinka Sole auttaa sinua?

Vesitankin strateginen sijoitus helpottaa tankin tarkastelua sekä puhdistamista, tavoitteena parhaat veden olosuhteet syvemmän steriloinnin saavuttamiseksi.

Veden suodattimen merkintä, joka ilmaisee vesitankin veden minimimäärän, täten estäen laitteen toimintahäiriön joka voi johtua veden vähäisestä määrästä.

Vaihtoehtoinen valinnainen funktio, jolla voi pidentää kuivaussykliä ja asettaa ajastimen sterilisointiprosessin aloittamiselle.

Missä on ero?

Sole on varustettu itse-diagnosointijärjestelmällä joka valvoo pääkomponenttien toimintoja.

Sole poistaa 98% kammion ilmasta kolmen fraktioidun tyhjiöprosessin avulla -0.80 Bar:issa. Tämä prosessi takaa hyvän ympäristön täydellisen kuivatyydyttyneen höyryn luomiseksi.

Sole on varustettu hetivalmiilla höyrynkehittimellä, joka mahdollistaa nopeammat syklit optimaalisilla tuloksilla ottaen huomioon vedenkulutuksen ja sterilointikuorman

Informaatio ja toimintaturvallisuus: Sole luo jokaiselle käyttäjälle oman käyttösalasanan

Turvalukitusjärjestelmä: Ovi lukittuu automaattisesti kun sykli alkaa.

Pääjännite	230 V AC
Linjan taajuus	50/60Hz
Maksimiteho	2300 Va
Ulkoiset ulottuvuudet	460 x 585 x 440 mm
Kammio sisältä	22 L 249 x 450 mm
Ulottuvuudet	17 L 249 x355 mm
Vesitankin kapasiteetti	3,5 L
Melutaso	dB(A)< 80dB

Luo turvallisempi työympäristö Solen avulla